

Код:	СОП-54-ПАО-05		
Название:	Стандартная операционная процедура: «Обработка и хранение парафиновых блоков с опухолевой тканью»		
Утвержден:	Приказом Председателя Правления АО «НЦН» № 08-3/346 от «31» августа 2022 года		
Разработчики:	<i>Должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>Подпись</i>
	Заведующий Патологоанатомическим отделением	Жетписбаев Б.Б.	
	Начальник Отдела менеджмента научных исследований	Солодовников М.П.	
	Старший лаборант- гистолог Патологоанатомического отделения	Мукалыкова Л.Е.	
	Главный специалист Отдела менеджмента научных исследований	Боброва К.Н.	
Согласовано:	Медицинский Директор	Калиев А.Б.	
	Директор по стратегии и науке	Доскалиев А.Ж.	
	Начальник Отдела контроля качества и управления рисками	Бисмильдин Ф.Б.	
	Начальник Отдела правового обеспечения	Нурканова Б.С.	
	Заведующий Сектором санитарно- эпидемиологического контроля	Абилхадиров Ж.К.	
Версия № 1	Копия № _____ / _____ / _____ подписьФИО		



1. Введение

В данном СОПе описывается маркировка парафиновых блоков с операционным материалом для хранения в биобанке. Заливка в парафиновые блоки является неотъемлемой частью техники приготовления гистологических препаратов для световой микроскопии. Основные этапы приготовления гистологических препаратов включают: 1) взятие материала; 2) фиксация; 3) промывка в воде; 4) обезвоживание и уплотнение; 5) заливка; 6) приготовление срезов; 7) окрашивание; 8) заключение срезов.


2. Обязанности

Ответственные сотрудники биобанка будут нести ответственность за обеспечение правильной маркировки и хранения парафиновых блоков в лаборатории биобанка.

3. Маркировка и хранение парафиновых блоков


- После заливки парафиновых блоков с операционным материалом субъекта, постановки патоморфологического диагноза пациента, транспортировка части парафиновых блоков в биобанк производится посредством сотрудничества с лаборантами Патологоанатомического отделения. Количество парафиновых блоков, разрешенных для хранения в биобанке, определяется врачом-патоморфологом.

- Промаркируйте парафиновые блоки (Б (номер блока) - номер отделения - номер субъекта - месторасположение блока). Укажите месторасположение парафиновых блоков в электронной базе данных. Хранить при комнатной температуре.

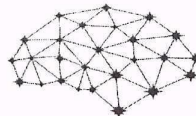

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
«Обработка и хранение парафиновых блоков с опухолевой тканью»
СОП-54-ПАО-05

[illegible]

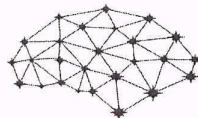

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
к Стандартной операционной процедуре
«Обработка и хранение парафиновых блоков с опухолевой тканью»
СОП-54-ПАО-05

[illegible]



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
со Стандартной операционной процедурой
«Обработка и хранение парафиновых блоков с опухолевой тканью»
СОП-54-ПАО-05

[illegible]